




Erisan Des

Desinfektioaine

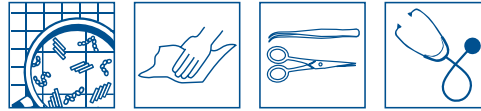

Kvatti-amiini-fenoksietanolipohjainen desinfektioaine terveydenhuollon ja hammashuollon erityistarpeisiin: desinfioivaan puhdistukseen, instrumentti- ja välinedesinfektioon sekä eritetahradesinfektioon.

Käyttökohteet

Terveydenhuollon pintojen puhdistus ja desinfektio, pesevänä desinfektioaineena UÄ-pesulaitteissa, veri- ja eritetahradesinfektio. Ei-invasiivisten välineiden ja instrumenttien desinfioiva puhdistus, invasiivisten instrumenttien esidesinfektio ennen pesua ja sterilointia. Suun terveydenhuollon hoitoyksiköiden pintadesinfektio sekä välineiden ja instrumenttien huolto (mm. ultraäänipesulaitteessa) hygieniavaatimusten mukaisesti.

Tuotekehitetty erityisesti lääkinnällisten laitteiden ominaisuudet huomioiden, soveltuu hyvin herkille materiaaleille: alumiini, kumi, erilaiset muovit.

Ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet

Desinfektioaineina ovat didekyylidimetyyliammoniumkloridi (kvaternäärinen ammoniumyhdiste), N,N-bis (3-aminopropyyli) dodekyyliamiini (alkyyliamiini) sekä 2- fenoksietanoli, joiden yhteisvaikutuksena saavutetaan laajakirjainen teho bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan.

Erisan Des desinfektioaineen teho on todennettu: EN 13727 (bakteerit) EN 13697 (bakteerit ja fungit), EN 13624 (hiivat), EN 14476 virusidinen teho (norovirus), EN 14561 (bakteerit), EN 14562 (hiivat), myös EN 16615 One System Basic -pyyhkeiden kanssa.

Käyttö- ja annostusohje

Valmista käyttölaimennos puhtaaseen, viileään veteen. Välineliotuksessa käytetään kannellista astiaa. Käytetty liuos vaihdetaan tarvittaessa, vähintään kerran viikossa. Vaihda liuos aina, kun se on näkyvästi likaantunut.

Puhdas käyttölaimennos säilyy 4 viikkoa suljetussa astiassa ja käytettäessä One System Basic pyyhkepakkausta.

Erisan Des käyttö- ja laimennusohjet	%	Erisan Des	Vesi	Vaikutus-aika	Huom!
Pintadesinfektio / pyyhintä	2	10 ml	490 ml		Huuhdellaan tarvittaessa
Eritetahradesinfektio	2	10 ml	490 ml		2-vaiheinen
	5	25 ml	475 ml		1-vaiheinen
Välinedesinfektio, upotus	2	20 ml	980 ml	30 min	Huuhdellaan
- norovirus	5	50 ml	950 ml	60 min	Huuhdellaan
- hammashuollon poranterät	100	upotus	-	30 min	Huuhdellaan
Ultraäänipesulaite	5	50 ml	950 ml		+ liotus yhteensä 30 min,
	2	20 ml	980 ml		huuhdellaan

Huomioitavaa

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Desinfektioaineille herkkimmät materiaalit on suositeltavaa pyyhkiä käyttöiheyden mukaan viikottain tai työpäivän päätteeksi myös vedellä tai miedolla pesuaineella kostutetulla pyyhkeellä.
Käyttölaimennoksen valmistamista helpottaa 500 ml pullossa oleva mitta (kertapainallus 5 ml).

Noudata laitevalmistajien erikoisohjeistuksia.

Clostridium difficile-epidemiaissa suosittelemme käytettäväksi Klorilli- tai Erisan Oxy+ desinfektioainetta.

Koostumus**Tehoaine****Vaikutus**

Didekyylidimetyyliammonium kloridi	5-15%	biosidi
2-fenoksietanoli	5-15 %	biosidi
Isopropanolia	<5%	liuotin
Ionittomia tensidejä	< 5%	pesuteho
Trietanoliamiinia	< 5%	pH:n säätelijä
N-(3-Aminopropyli)-N-dodekylipropaani-1,3-diamiini	<5%	biosidi, pesuteho
Dietanoliamiinia	<1%	korroosiosuoja

Tuotteen pH

11.0 emäksinen

Käyttöliuoksen pH

10.0 heikosti emäksinen

Varastointi

Huoneenlämmössä 3 v.

Ulkonäkö ja tuoksu

Kellertävä neste, ominainen tuoksu

Valmistusmaa

SUOMI

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
3 x 3 l	8127	6417964081275	6417964482416
12 x 500 ml	8126	6417964081268	6417964482423

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.