

Tuotetiedot

FD 312 pintadesinfiointiaine



FD 312 yhdellä silmäyksellä

- Tiiviste ei-invasiivisten lääkinnällisten tuotteiden ja esineiden desinfiointiin ja puhdistukseen vastaanotoilla, laboratorioissa ja sairaaloissa.
- Laaja vaikutusspektri: bakterisidinen, hiivasieniä tuhoava, rajoitetusti virusidinen (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV ja HIV sekä vaipattomat virukset kuten adeno- ja norovirukset).
- Testattu ajankohtaisten VAH-menetelmien ja eurooppalaisten standardien mukaan.
- Testattu 4-kenttätestissä VAH:n ja EN 16615:n mukaan.
- VAH-lista.
- Erinomainen yhteensopivuus materiaalien kanssa ja miellyttävä tuoksu.
- Taloudellista käyttöä alhaisen käyttöpitoisuuden vuoksi.
- Aldehyditön – vaikutus perustuu kvaternäärisiin ammoniumyhdisteisiin.
- Käyttöä suositellaan erityisesti FD multi wipes- ja FD multi wipes compact -pyyhkeiden kanssa.

Ominaisuudet

Dürr System-Hygiene -tuotesarjan FD 312 on erittäin tehokas, aldehyditön valmiste, jota voidaan käyttää ei-invasiivisten lääkinnällisten tuotteiden ja esineiden samanaikaiseen desinfiointiin ja puhdistukseen vastaanotoilla, laboratorioissa ja sairaaloissa. FD 312 on materiaalia säästävä, ja sen tuoksu on miellyttävä. FD 312 -tuotteen käyttöä suositellaan erityisesti FD multi wipes- ja FD multi wipes compact -pyyhkeiden kanssa.

Koostumus

FD 312 -tuotteen vaikutus perustuu kvaternäärisiin ammoniumyhdisteisiin. 100 g FD 312 sisältää 6,5 g alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridia, 5–15 % ionittomia tensidejä, < 5 % emäksisiä puhdistuskomponentteja, < 5 % kompleksinmuodostajia, apuaineita, heksyyliinnamaalia, butyyli-fenyyli-metyyli-propionalia ja linalolia vesiliuoksessa.

Mikrobiologinen teho

FD 312 vaikuttaa bakterisidisesti¹⁾, hiivasieniä tuhoavasti¹⁾, rajoitetusti virusidisesti (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV ja HIV^{2),3)} sekä vaipattomat virukset kuten adeno-¹⁾ ja norovirukset¹⁾). VAH-lista. Testattu EN 13727, EN 13624, EN 16615, EN 14476 mukaan.

Käyttö

FD 312:ta käytetään VAH:n mukaan 1 %:sena liuoksena 15 minuutin vaikutusajalla. Lyhyen aikavälin desinfiointi 2 %:sella liuoksella ja 5 minuutin vaikutusajalla. Suurten pintojen desinfiointiin suositellaan sopivaa kostean pyyhinnän menetelmää. Pyyhi lääketieteellisten laitteiden pinnat kostealla pyyhkeellä. Huomioi tarvittaessa valmistajan antamat tiedot. Käytä ainetta on tasaisesti käsiteltävillä pinnoilla. Käytä samanaikaisesti FD 312 1–2 % kostuteilla FD multi wipes- ja FD multi wipes compact -pyyhkeillä. Varmista kaikkien pintojen kostuminen kokonaan. Lisätietoja on FD multi wipes- ja FD multi wipes compact -pyyhkeiden käyttöohjeessa.

Ympäristövaikutukset

OECD-kriteerien 301 D mukaan FD 312 on biologisesti helposti hajot-

Tuotetiedot

FD 312 pintadesinfiointiaine

ava. Polyteenistä ja polypropeenista valmistetun pakkauksen materiaalin voi lämpökierrättää. Pullo on huuhdeltava vedellä ennen kierrätystä. Katso tiivisteestä hävittämistä koskevat ohjeet käytöturvallisuustiedotteesta.

Fysikaaliset ominaisuudet

Tiiviste:

Ulkonäkö: kirkas, vihreä, matalaviskoosinen neste

Tiheys: $D = 1,05 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

pH-arvo: $12,8 \pm 0,3$

Käyttöliuos (1 %):

Ulkonäkö: kirkas, vaaleanvihreä liuos

pH-arvo: $9,5 \pm 0,5$

Säilyvyys

Tiiviste: 4 vuotta

Käyttöliuos: Käyttämätön liuos 28 vuorokautta, käytetyt liuokset on hävitettävä käytön jälkeen.

Pakkauskoko

2,5 l:n pullo

Säilytys

Säilytä valmistetta vähintään 5 °C:n ja enintään huoneen lämpötilassa.

Tarvikkeet

FD multi wipes / FD multi wipes compact

Yleisiä ohjeita

Kostea pyyhintä ja puhdistus on tehtävä päivittäin kaikilla alueilla, joilla infektioartunnat ovat mahdollisia tai jotka on suojattava kontaminaatiolta. FD 312:n sopivuus on yksittäistapauksissa tarkastettava sellaisten materiaalien osalta, jotka eivät ole vedenkestäviä.

FD 312:n yhteensopivuus tavanomaisten lattiamateriaalien kanssa (esim. PVC, PUR®-pinnoitettu linoleumi) on testattu. FD 312 soveltuu lattioiden puhdistukseen ja desinfiointiin pinnoitteen ollessa vahingoittumaton. Jos pinnan materiaali koostumusta ei tunneta, on suositeltava valmistajan ohjeita ja testattava yhteensopivuus huo-

Käyttö	Pitoisuus	Vaikutusaika
Pintadesinfiointi (VAH-menetelmät) ¹⁾	1 %	15 min.
	2 %	5 min.
Bakteerit ¹⁾ ja hiivasienet ¹⁾	1 %	15 min.
Vaccinia-virukset ml. HBV, HCV, HIV ^{2), 3)}	1 %	60 min.
	2 %	15 min.
Adeno-virukset ¹⁾	4 %	30 min.
Noro-virukset ¹⁾	4 %	30 min.

1) Testattu suuressa kuormituksessa (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 16615, EN 14476).

2) Testattu ilman kuormitusta ja kuormitettuna DVV/RKI-suosituksen mukaisesti.

3) RKI-lausunnon mukaisesti (Bundesgesundheitsbl. 60, 353 - 363, 2017).

maamattomassa paikassa. Tuotteen värin ja hajun muutokset ovat mahdollisia erityisesti säilytettäessä tuotetta auringonvalossa. Näillä väri- ja hajumuutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen desinfiointitehoon.

Varoitukset

FD 312 on luokiteltu ja merkitty CLP-määräyksen mukaisesti: katso tuotemerkinnät ja käytöturvallisuustiedote.

Riippumattomat lausunnot – omat tutkimukset

Lausunnot ovat saatavilla pyynnöstä.

Käytä desinfiointiaineita varovasti. Lue aina myyntipäällyksmerkintä ja tuotetiedot ennen käyttöä.

CE 0124

Myynti

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerredental.com
info@duerredental.com

Valmistaja

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de

