






ORBIS

Vastaanoton puhdistus- ja desinfiointisuunnitelma

TUOTE	KÄYTTÖKOHDE	TARKENNUS KÄYTTÖ-KOHTEESEEN	KÄYTTÖ-PITOISUUS (%)	VAIKUTUS-AIKA	MILLOIN KÄYTETÄÄN	OHJEITA JA HUOMIOITA	PAKKAUKSET	
	Orbis pesuneste	Käsienpesuun	100 %		Pese aina näkyvästi likaiset kädet.	Kastele kädet, hiero saippua huolellisesti ja huuhtele.	MD121942 Pumpppullo 0,5 L MD121940 Dispensopac 1 L	
	Orbis käsihuhde	Käsien desinfiointiin	100 %	3-5 ml, 30 s 3-5 ml, 60 s	Ennen potilaskosketusta tai toimenpidettä sekä sen jälkeen. Hoitotapahtuman aikana aseptisen työjärjestyksen mukaisesti. Ennen hoitoympäristöön menemistä ja sieltä poistuttaessa.	30 s hygieeninen käsien desinfektio 60 s kirurginen käsien desinfektio	MD121941 Pumpppullo 0,5 L MD121939 Dispensopac 1 L MD173313 Kanisteri 5 L MD168794 Pumppu 5 L kanisteriin	
	Orbis käsivoiteet	Käsien ihon kosteutukseen		100 %		Tarvittaessa		R200535 Balsami 100 ml R302804 Suojaava käsivoide 100 ml
	Orbis nopeasti tehoava desinfektio-aine	Pinnoille ja hoitoyksiköille	Alkoholia kestäville pinnoille	100 %	Kuivumisaika	Jokaisen potilaan jälkeen	Nihkeä pyyhintä, purista ylimääräinen neste liinasta.	MD121936 Keinukorkkipullo 0,5 L MD121937 Kanisteri 5 L MD168794 Pumppu 5 L kanisteriin
	Orbis nopeasti tehoava desinfektio-aine Wipes						Orbis nopeasti tehoava desinfektioaine valmiiksi imeytettynä liinoihin (20 x 20 cm).	MD125294 Säiliö + liinat 150 kpl MD125295 Refill liinat 100 kpl
	Orbis ORBI-Sept Wet Wipes Sensitive	Pinnoille ja hoitoyksiköille	Herkille pinnoille	100 %	Kuivumisaika	Käytön jälkeen	Orbis nopeasti tehoava sensitive -desinfektioaine valmiiksi imeytettynä liinoihin (20 x 30 cm).	R201388 Liinat 80 kpl
	Orbis ORBI-Sept SD pintojen desinfiointi- tiiviste	Hoitohuoneen yleis- siivoukseen	Verhoiluille, lattioille tai ei-invasiivisille lääkinällisille laitteille	0,5-3 %	15-60 min	Päivän päätteeksi	Kontaminoimaton liuos pysyy käyttökelpoisena n. 30 päivää. Puhdistusainejäämien ehkäisemiseksi pyyhi pinnat kerran viikossa pelkällä vedellä.	MD169158 Pullo 2,5 L
	Orbis Dry Wipes	Pintojen pyyhkimiseen					Kuivat pyyhintäliinat (20 x 20 cm). Lisää desinfektioaine pakkauksen ohjeen mukaan.	MD164517 Säiliö + liinat 150 kpl MD164518 Refill liinat 100 kpl
	Orbis ORBI-Sept SSD tehoimun pesu- ja desinfiointi- tiiviste	Imulaitteistolle		2 %		1-2 krt/päivä	Annostele 20 ml tiivistettä 980 ml vettä. Laimennettu liuos imetään imu- järjestelmään.	MD164014 Pullo 2,5 L
	Orbis ORBI-Sept SSC imulaitteiston erikoispuhdistus- tiiviste	Imulaitteistolle		5 %		1-2 krt/viikko	Annostele 100 ml tiivistettä 1900 ml vettä. Anna vaikuttaa 30 min. Puhdistuksen jälkeen imulaitteisto huuhdellaan litralla vettä.	M123926 Pullo 2,5 L
	Orbis tehoimun suodatin					Puhdistetaan päivittäin, vaihdetaan viikoittain		MD166455 Suodattimet 12 kpl
	Orbis sylkykupin puhdistus- ja desinfiointiaine	Sylkykupille; soveltuu myös WC-tilojen puhdistukseen		100 %	Vähintään 1 min	1-2 krt/päivä	Annostele, anna vaikuttaa ja huuhtele.	MD115211 Kaatonokkapullo 750 ml
	Orbis ORBI-Sept IMD jäljennösten desinfiointiaine	Alginaatti-, silikoni- ja polyeetteri- jäljennöksille	Upotusdesinfektio	100 %	1 min	Jäljennöksen ottamisen jälkeen	Desinfioi aina jäljennökset ennen labraan lähettämistä. Upota alginaatit ja hydrokolloidit hetkeksi ja anna kuivua. Huuhtelee jäljennös sen jälkeen vedellä. Noudata tarkoin vaikutusaikaa.	MD168125 Pullo 2,5 L
	Orbis Tray Cleaner jäljennöslusikoiden puhdistus- tiiviste	Instrumenttien puhdistamiseen jäljennösaineista	Irrottaa alginaatti-, sinkkioksidieugenoli-, karboksylaatti- ja fosfaattisementti- jäämät sekä termostplastiset vahat mm. jäljennöslusikoista	5-10 %, tarvittaessa 100 %	45 min	Tarvittaessa	Upota puhdistettavat instrumentit liuokseen. Liuos soveltuu myös ultraäänipesulaitteeseen. Sopii ruostumattomille materiaaleille. Huom! Älä laita kromia, nikkeliä tai alumiinia sisältäviä tuotteita samaan liuokseen korroosiovaaran vuoksi.	MD117137 Orbis Tray Cleaner 1 L
	Orbis ORBI-Sept IND instrumenttien desinfiointi- tiiviste	Instrumenteille, juurihoitoneuloille	Upotusdesinfektio Soveltuu myös ultraäänipesulaitteeseen sekä ultraäänipesu- laitteen päältäan liuokseksi	1,5-1 %	15-60 min*	Heti käytön jälkeen	Puhdista näkyvästi likaiset instrumentit ennen upotus- desinfiointia. Vaikutusajan jälkeen huuhtelee ja kuivaa hyvin. Käyttöliuos vaihdetaan päivittäin tai kun liuos on silmin- nähden likaista. Ultraäänipesulaitteen dekanterilas- in desinfiointineste vaihdetaan joka käyttösyklin jälkeen.	MD168461 Pullo 2,5 L 72130 Instrumenttien liuotusallas
	Orbis esikäsitelyaine	Suoja-aine instrumenteille		100 %	Maks. 4 vrk	Tarkoitettu käytettäväksi instru- menteille, jotka eivät päädy pesuun tai dekontaminoivaan liuokseen heti käytön jälkeen	Aseta instrumentit kuljetuslaatikkoon. Suihkuta esi- käsitelyainetta instrumenttien päälle. Huolehdi instrumenttien riittävästä kastumisesta. Huuhtelee ennen jatkokäsittelyä.	MD163276 Suihkepullo 1 L
	Orbis ORBI-Sept DB porien desinfiointi- tiiviste	Pyöriville instrumenteille	Kaikille porille, mm. timanteille, freesareille ja finiireille	100 %	5 min	Heti käytön jälkeen	Sisältää korroosionestoainetta. Pyörivien instrumenttien desinfiointion suositellaan käytettäväksi ultraäänilaitetta.	MD168176 Pullo 2,5 L 67413 Poranpuhdistuskoppi
Muut merkinnät								

* Tbb 3 % 60 min, Tbb 4 % 30 min.

Tutustu kaikkien tuotteiden käyttöohjeisiin huolella. Hygieniaohjeistus on suuntaa antava. Vastaanotto on vastuussa hyväksyttävän ja riittävän hygieniakäytännön toteutuksesta.

Päiväys _____

Hygienia vastaava _____